

## REALQUALITY RQ-VZV STANDARD



Standard quantificati pronti all'uso per la quantificazione del virus  
*Varicella Zoster (VZV)*

### Cod. RQ-36

Descrizione	Lo standard quantificato REALQUALITY RQ-VZV STANDARD è da utilizzarsi esclusivamente in associazione al kit REALQUALITY RS-VZV cod. RQ-35 qualora il test sia di tipo quantitativo. Lo standard è costituito da frammenti di DNA contenenti la regione genica d'interesse e non costituisce pertanto alcun pericolo per l'operatore.
Stato dei reagenti	Pronti all'uso
Confezionamento	4 × 60 µL Vengono forniti 4 punti di calibrazione, ciascuno subaliquotato in 3 x 20 µL, in quantità sufficiente per allestire fino a 12 curve standard.
Stabilità	12 mesi Ciascuna aliquota dello standard può subire un numero massimo di 3 cicli di congelamento e scongelamento: ulteriori cicli compromettono la stabilità del prodotto e ne possono alterare la concentrazione.
Conservazione	-30°C/-20°C Si raccomanda di congelare lo standard dopo ciascun utilizzo.
Concentrazione	STANDARD 1: 20 copie genoma virale/µL STANDARD 2: 200 copie genoma virale/µL STANDARD 3: 2.000 copie genoma virale/µL STANDARD 4: 20.000 copie genoma virale/µL
Istruzioni per l'uso	Per ottenere una curva standard nel range 10 <sup>2</sup> -10 <sup>5</sup> copie di DNA, utilizzare 5 µL a reazione, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel manuale d'uso del kit REALQUALITY RS-VZV cod. RQ-35. Si raccomanda di vortexare e centrifugare ciascuna <i>vial</i> prima dell'uso.

### INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Cod.	Prodotto	Formato
RQ-36-SM	REALQUALITY RQ-VZV STANDARD	4 x 60 µL
<b>abbinato al prodotto:</b>		
RQ-35-4M	REALQUALITY RS-VZV	50 test
RQ-35-6M		100 test